



**HOCHGLANZ IN
90 SEKUNDEN**

NACERA® SHINE ZR

GEBRAUCHSANWEISUNG

Die **Nacera® Shine Zr** Diamant Polierpaste ermöglicht in kürzester Zeit einen langanhaltenden hochkarätigen Glanz auf Zirkonoxid. Die hellgraue Paste ist nicht nur effektiv und zeitsparend in der Anwendung, sondern auch einfach im Handling und effizient im Verbrauch.

Ob zur Vorpolitur mit handelsüblichen harten Bürsten oder zur Hochglanzpolitur mit Ziegenhaarbürsten, Baumwoll- oder Lederschwabbeln: Das neue Poliermittel ist so abrasiv zur Oberfläche wie nötig und so schonend wie möglich.

- ✓ Hochglanz Finish von Zirkonrestauration in 90 Sekunden
- ✓ Langanhaltender, hochkarätiger Glanz auf Zirkonoxid
- ✓ Sehr hoher Diamantanteil und eine besonders harte Konsistenz - für weniger Aufwand und Kosten
- ✓ Einfach im Handling und effizient im Verbrauch
- ✓ Zeitsparend in der Anwendung

Aufgrund der harten Konsistenz und einem speziellen Wachssäuregemisch als Binde- und Haftmittel wird nur die für den jeweiligen Vorgang benötigte Menge vom Polierinstrument aufgenommen.

Das heißt: kein Wegspritzen oder Verschmieren von überschüssigem Material und damit mehr Effizienz und Sauberkeit beim Bearbeiten von Zirkonoxid und weniger Verbrauch der hochwertigen Diamantpaste.



Nicht zur intraoralen Verwendung geeignet



Vorpolitur:
5.000 - 10.000 U/Min



Hochglanzpolitur:
5.000 - 15.000 U/Min



Sie bevorzugen ein Anwendungsvideo? Besuchen Sie unseren Youtube Channel www.youtube.com - Stichwort „Nacera Inside“ oder scannen Sie den QR-Code.