

Instructions d'utilisation: Nacera® Blue X

Application

⚠ Note générale

Nacera® Blue X doit être stocké à des températures comprises entre 10°C et 40°C. Le liquide doit être protégé contre l'ensoleillement direct. Pour éviter une contamination, utilisez Nacera® Blue X, uniquement avec des pinceaux sans métal. Bien agitez avant utilisation.

⚠ Danger

Veillez utiliser votre équipement de protection personnelle, en particulier vos lunettes de sécurité pendant l'utilisation de Nacera® Blue X. Le liquide est impropre à la consommation. Il doit être éliminé convenablement. Vous trouverez plus d'informations dans la fiche de données de sécurité.

i Consignes de sécurité

Veillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser Nacera® Blue X. Elles contiennent des informations importantes, nécessaire pour une utilisation correcte et pour la sécurité des patients et des utilisateurs. Le liquide Nacera® Blue X est fabriqué et testé selon les standards de qualité les plus stricts. Afin de garantir cette qualité également pendant le tutilsation, il est impératif de suivre le protocole cidessous. Cela assure la haute qualité des restaurations.

INDICATION Indication

Nacera® Blue X fait partie du système Nacera® et ne peut être utilisé qu'avec des produits de la gamme Nacera® Pearl. Le liquide augmente la translucidité dans la zone incisale sur laquelle il est appliqué. L'objectif est de créer un émail dentaire esthétique, d'aspect naturel.

INDICATION Contre-indication

Nacera® Blue X est contre-indiqué en cas de bruxisme. Ne traitez pas les bridges de plus de trois unités, ni les pontiques, et les connecteurs avec Nacera® Blue X.

Nacera® Blue X ne doit être utilisé qu'avec les produits Nacera® Pearl. Pour plus d'informations, veuillez lire les instructions de Nacera® Pearl Zirconia.

MAXI. 3 UNITÉS			EXTÉRIEUR UNIQUEMENT			PAS DE CONNECTEURS		
PAS DE PONTIQUE			PAS DE SOUS-STRUCTURE			PAS D'ABUTEMENTS		

Application

Application

Afin d'obtenir les résultats souhaités, nous recommandons d'appliquer **Nacera® Blue X** dans la zone incisale / occlusale des couronnes / bridges.

Bien agitez avant emploi. Pour éviter toute contamination, utilisez uniquement un pinceau sans métal.

Ne travaillez pas en vous servant directement dans le flacon mais utilisez toujours une plaque séparée et appliquez avec un pinceau non-métallique dédiée uniquement à l'utilisation de **Nacera® Blue X**. Veuillez suivre les étapes 1 à 4, comme suit, par ex. sur une couronne antérieure :

1. Appliquer **Nacera® Blue X** en vestibulaire, à partir, du centre vers l'incisal.
2. Appliquer **Nacera® Blue X** à partir du tiers supérieur vers l'incisal.
3. Appliquer **Nacera® Blue X** à partir du quart supérieur à l'incisal.
4. Répéter la 3ème étape

La couleur bleue de l'indicateur vous permet de contrôler la quantité de **Nacera® Blue X** utilisée.

Ne remettez pas le liquide **Nacera® Blue X** utilisé dans la bouteille.

Frittage

Séchez les couronnes traitées avec **Nacera® Blue X** pendant 15 minutes avant de poursuivre le traitement.

Frittez les couronnes traitées avec **Nacera® Blue X**, conformément aux cycles de frittage indiqués dans les instructions de **Nacera® Pearl**.

Si vous préférez une autre langue, veuillez scanner le code QR ci-dessous ou rendez-vous sur doceram-medical.com/en/downloads/

Vous préférez un didacticiel vidéo ? Rendez-vous sur notre chaîne YouTube ! www.youtube.com - Chercher « Nacera Inside » ou scannez le code QR.

Technique d'application au pinceau restauration antérieure

	START 0			1			2		
		3					4		DRY
Important : Utilisez uniquement un pinceau non métallique. Bien agitez avant utilisation.									